

Disinfettante detergente con alcool biologico purissimo
e profumazione delicata,
**ad elevata azione tubercolicida,
battericida, fungicida, virucida**

Rev. 6 - 11/2019

INDICAZIONI

SPORIGERM SPRAY+ soluzione pronta all'uso svolge un'efficace e rapida azione disinfettante contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi, lieviti, Micobatterio Tuberculare (TBC), Virus (Adenovirus, HIV – HBV – HCV).

SPORIGERM SPRAY+ è un prodotto specifico per la disinfezione e la detersione rapida anche in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati) di superfici di dispositivi medici non invasivi (es. riuniti, piani di lavoro, braccioli, maniglie, turbine, maschere facciali, poggiatesta) in uso presso lo studio dentistico.

ISTRUZIONI PER L'USO

Si usa puro. Spruzzare con l'apposito erogatore a 15/20 cm di distanza sull'oggetto da detergere o disinfettare.
Verificare dopo lo spruzzo che la superficie sia ben umida.
Lasciare agire per i tempi indicati, asciugare con un panno o carta monouso.

TEMPI DI CONTATTO

| | |
|--|--------|
| Virus con involucro (HIV-HBV-HCV) | 5 min |
| Batteri | 5 min |
| Funghi (lieviti) | 5 min |
| Virus senza involucro (Adenovirus) | 5 min |
| Micobatterio Tuberculare (TBC)..... | 60 min |

CONFEZIONAMENTO


Sporigerm Spray+

Codice 501001 12 flaconi da 750 ml + 4 nebulizzatori
Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea.
Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.

COMPOSIZIONE 100,00 g di prodotto

| | |
|---|----------|
| Benzalconio cloruro | 0,50 g; |
| O-fenilfenolo | 0,02 g; |
| Alcol isopropilico, Alcol etilico, coformulanti, acqua depurata q.b. a | 100,00 g |

Dispositivo Medico Classe IIb
CE n° 0546

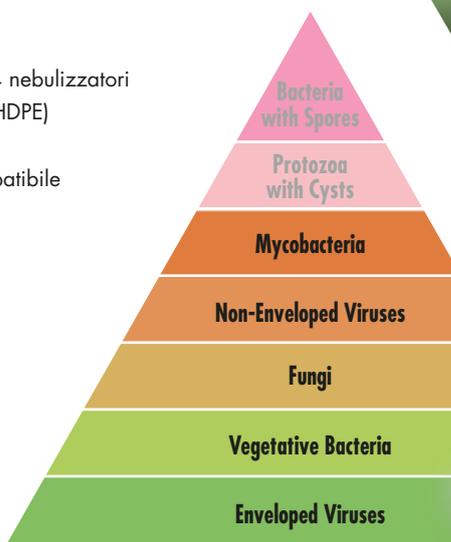

**INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI
E UTILIZZATORI PROFESSIONALI**

Prodotto da:
GERMO S.p.A.
Via Giotto n 19/21 - 20032 Cormano M
Tel. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com



Distribuito da:
IDS S.p.A.
Via S. Cristoforo 28/10
17100 Savona - Italy
www.ids dental.it - info.ids dental.it

Disinfettante detergente con alcool biologico purissimo
e profumazione delicata,
**ad elevata azione tuberculocida,
battericida, fungicida, virucida**

ATTIVITA'

Il Sale d'Ammonio Quaternario in sinergia con O-Fenilfenolo, in soluzione alcolica, garantisce un totale spettro d'azione nei confronti di batteri Gram-positivi e Gram-negativi, lieviti, micobatteri (TBC) e virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV).

EN13727 - EN 13697

Battericida

EN13624 - EN 13697

Lieviticida

EN14476

Virucida (Adenovirus, HIV-HCV-HBV)

EN14348

Micobatterio Tuberculare (TBC)


VALIDITA' PRODOTTO

3 anni (Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.)

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

AGENTI PATOGENI CLASSIFICATI IN BASE ALLA RESISTENZA AI DISINFETTANTI

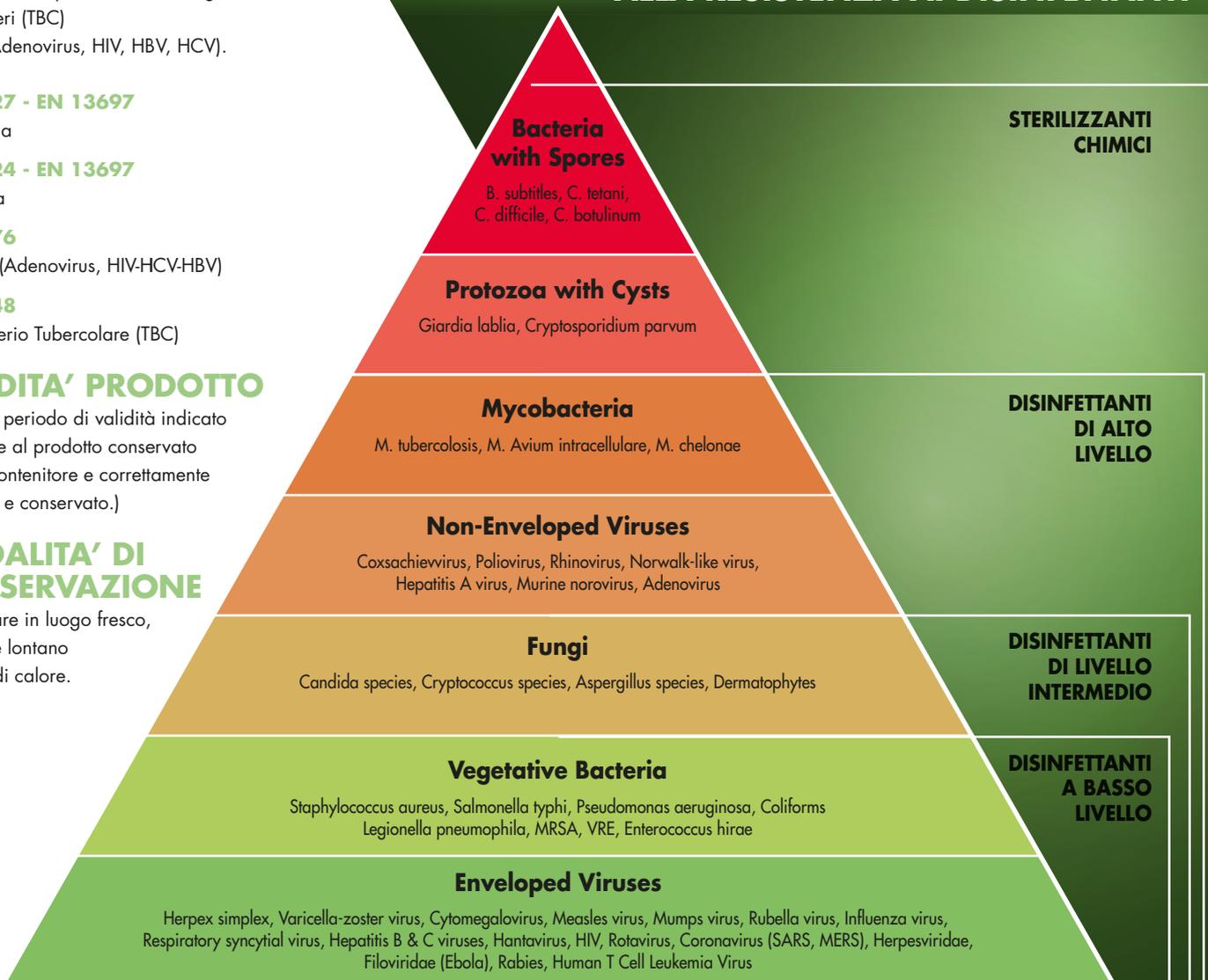

AVVERTENZE

Evitare l'impiego su materiali deteriorabili dall'alcol e non vaporizzare su apparecchi in tensione.

CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI
E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Prodotto da:

GERMO S.p.A.

Via Giotto n 19/21 - 20032 Cormano M

Tel. 02 663 01-938

www.germo.it - info@germodis.com

Distribuito da:

IDS S.p.A.

Via S. Cristoforo 28/10

17100 Savona - Italy

www.ids dental.it - info.ids dental.it