



# ALUCLOR

## Soluzione astringente per retrazione gengivale

### 1. COMPOSIZIONE

Alluminio cloruro 25%  
8-idrossichinolina solfato ed eccipiente idroalcolico q.b.

### 2. PROPRIETA'

Il prodotto ha un notevole potere astringente e quindi garantisce una buona emostasi locale e una contrazione degli strati più superficiali della gengiva.

### 3. INDICAZIONI

- nella retrazione gengivale per impregnazione in situ del filo  
- nei gemizi siero sanguinolenti della gengiva

### 4. MODALITA' D'USO

**Azione emostatica:** applicare con una pipetta 1-2 gocce di prodotto. Attendere 1-2 minuti quindi risciacquare accuratamente la zona di applicazione.

**Retrazione gengivale:** inserire nel solco un filo retrattore (non medicamentoso) e imbibirlo con qualche goccia di Aluchlor soluzione. Lasciare il filo in situ per 3-5 minuti, quindi toglierlo assicurandosi che non resti alcun filamento nel solco gengivale, indi risciacquare abbondantemente.

### 5. RISCHI

Il prodotto è controindicato nei pazienti sensibili all'alluminio o ai composti chinolinici.

### 6. PRECAUZIONI

Usare guanti protettivi ed occhiali.

Non ingerire.

Non superare i tempi di applicazione onde evitare possibili irritazioni alle gengive.

Sciacquare bene la zona di applicazione dopo l'uso per non lasciare residui di sali di alluminio che possono risultare irritanti.

Non utilizzare il prodotto con fili medicamentosi

### 7. AVVERTENZE

Xi – prodotto irritante per occhi e pelle.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Non disperdere la confezione nell'ambiente dopo l'uso.

Non utilizzare dopo la scadenza riportata sulla confezione.

### 8. CONSERVAZIONE

Conservare il flacone ben chiuso lontano da fonti di calore.

### 9. PRESENTAZIONE

Flacone da 15 g con micropipetta dosatrice.

### 10. REGIME DI UTILIZZO

Dispositivo medico ad esclusivo uso degli specialisti in odontoiatria e stomatologia

Cod. 1055

Rev.0 del 09-2011

OGNA Laboratori Farmaceutici  
Via Figini, 41 – 20053 Muggiò (MI)  
Divisione Odontoiatrica – tel. 039/2782954- fax 039/2782958  
Web: [www.ognalaboratori.it](http://www.ognalaboratori.it)